

Advertências: Produto de uso único. Inflamável, use em áreas bem ventiladas. Evite a manipulação junto de fontes de ignição ou chamas. Evite contato com os olhos.

Modo de uso: Borrife o Removedor de Adesivos Aerossol Derma Protect nas extremidades do adesivo médico, aguarde alguns segundos e retire o adesivo. Se houver resistência do adesivo, borrife novamente auxiliando com a outra mão a retirada do adesivo, sempre das extremidades para o interior do curativo.



REMOVEDOR DE ADESIVOS AEROSSOL DERMA PROTECT.

Descrição: Produto cosmético, classe I (conforme classificação da ANVISA). É apresentado na forma de aerossol.

Composição: Disiloxane, butanol/propanol.

Indicação de uso: Remoção fácil da base adesiva e as sobras de resíduos adesivos médicos, sem ardor. Não contém álcool, portanto, não arde nem machuca a pele. Seca em segundos e não afeta as outras adesões, deixando você pronto para aplicar um novo adesivo.

Precauções: Aplicar o produto sobre a pele, a uma distância de aproximadamente 15cm. Produto inflamável. Em caso de irritação suspenda o uso. O uso do Removedor de Adesivos Aerossol Derma Protect, deve ser indicado e acompanhado por um profissional habilitado. Mantenha afastado de crianças. Somente para uso externo. Manter sempre em sua embalagem original, em local seco e temperatura ambiente. Não expor o produto à luz solar direta e umidade.

Validade: 3 anos a partir da data de fabricação.

Cadastro Anvisa N°: 25351.075679/2024/17

Condições de Armazenamento e Conservação: Manter em local limpo e ao abrigo da luz. Aconselhável manter em temperatura abaixo de 25°C.

Embalagem: O produto se apresenta nas dimensões e nas quantidades conforme tabela abaixo:

CÓDIGO

PA. 1395

DESCRIÇÃO

Removedor de Adesivos Aerossol Derma Protect 50mL

APRESENTAÇÃO

1 unidade

EAN

7896544926776