

**Modo de uso:** Abrir a embalagem e desdobrar o lenço. Aplicar o lenço aberto sobre o resíduo de adesivo para removê-lo, girando em movimentos circulares. Seca em alguns segundos.



## REMOVEDOR DE ADESIVOS LENÇO DERMA PROTECT.

**Descrição:** Produto cosmético, classe I (conforme classificação da ANVISA). É apresentado na forma de lenço.

**Composição:** Disiloxane.

**Indicação de uso:** Remoção fácil da base adesiva e as sobras de resíduos adesivos médicos, sem ardor. Não contém álcool, portanto, não arde nem machuca a pele. Seca em segundos e não afeta as outras adesões, deixando você pronto para aplicar um novo adesivo.

**Precauções:** Em caso de irritação suspenda o uso. O uso do Removedor de Adesivos Lenço Derma Protect, deve ser indicado e acompanhado por um profissional habilitado. Mantenha afastado de crianças. Somente para uso externo. Manter sempre em sua embalagem original, em local seco e temperatura ambiente. Não expor o produto à luz solar direta e umidade.

**Validade:** 3 anos a partir da data de fabricação.

**Cadastro Anvisa N°:** 25351.075848/2024/17

**Condições de Armazenamento e Conservação:** Manter em local limpo e ao abrigo da luz. Aconselhável manter em temperatura abaixo de 25°C.

**Advertências:** Produto de uso único. Inflamável, use em áreas bem ventiladas. Evite a manipulação junto de fontes de ignição ou chamas. Evite contato com os olhos.

**Embalagem:** O produto se apresenta nas dimensões e nas quantidades conforme tabela abaixo:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	EAN
PA.1442	Removedor de Adesivos Lenço Derma Protect	cartucho com 30 unidades	7896544926776